


Guide rapide du module de gestion Ambu®

Modifier la langue du menu


La langue du menu standard est définie comme l'anglais. Dans les sections suivantes, vous découvrirez comment modifier la langue.

1. Connecter le mannequin avec votre ordinateur

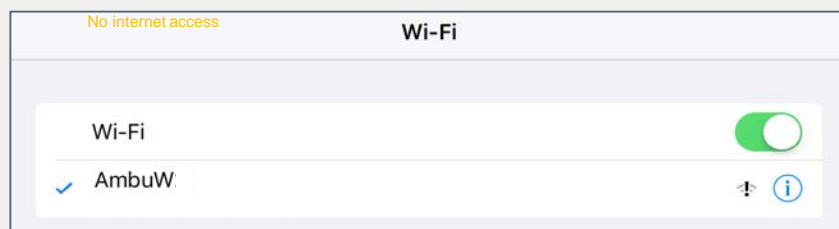

1. Allumez le mannequin en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation situé sur le moniteur de contrôle mécanique. Dès que le voyant LED du bouton d'alimentation est constamment allumé, vous pouvez vous connecter au mannequin via WiFi. Pour ce faire, sélectionnez le réseau sans fil "AmbuW".


2. Ouvrez la configuration générale

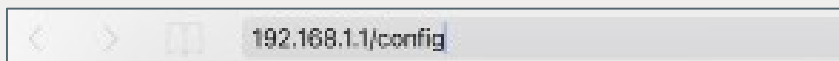


Pour accéder à la configuration, entrez `http://Ambu.login/config` ou `192.168.1.1` dans la barre de recherche du navigateur et confirmez.


3. Modifiez la langue du menu

Après avoir accédé à la page, vous serez dans l'onglet "Présentation" du menu. Pour accéder aux paramètres de la langue, cliquez sur l'onglet "Système".

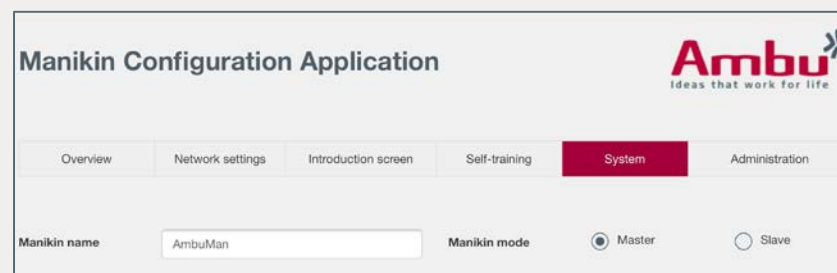

Suite: Modifiez la langue du menu


Si vous cliquez sur la liste de sélection "Langue", vous pouvez sélectionner la langue souhaitée. Enfin, cliquez sur le bouton "Enregistrer", 

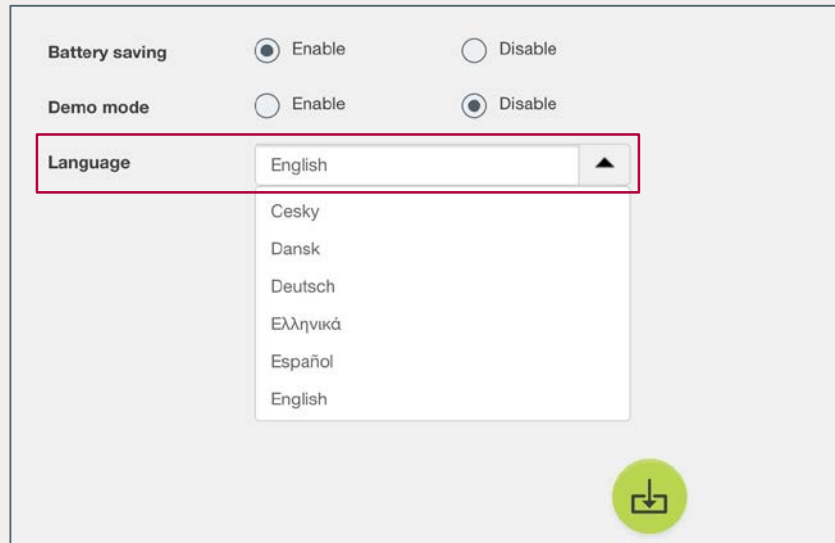

The screenshot shows a configuration panel with the following elements:

- Battery saving**: Enable, Disable
- Demo mode**: Enable, Disable
- Language**: A dropdown menu is open, showing a list of languages: English (selected), Cesky, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, and English.
- A green circular button with a save icon is located at the bottom right of the panel.

4. Acceptez les nouveaux paramètres

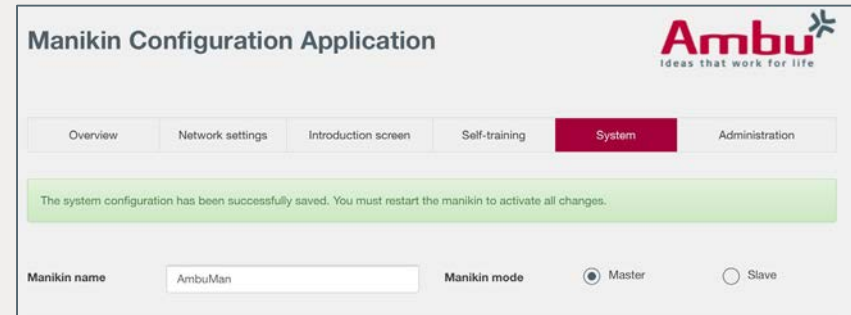

The screenshot shows the "Manikin Configuration Application" interface with the "System" tab selected. The interface includes the following elements:

- Logo: **Ambu** Ideas that work for life
- Navigation tabs: Overview, Network settings, Introduction screen, Self-training, **System**, Administration
- Message: "The system configuration has been successfully saved. You must restart the manikin to activate all changes." (highlighted in green)
- Fields: **Manikin name** (AmbuMan), **Manikin mode** (Master, Slave)

Une fois que les paramètres de langue ont été enregistrés, le mannequin doit être redémarré afin que les paramètres puissent être importés correctement.