

# Guide rapide du module de gestion du mannequin Ambu®

## Utilisation du logiciel sur mobiles et appareils

Le mannequin fournit des interfaces multiples ce qui vous permet de vous connecter au mannequin avec n'importe quel mobile et accéder en mode public. Il est recommandé d'avoir du Wifi sur vos appareils pour l'utilisation du logiciel.

Dans les sections suivantes sont affichées les différents moyens de connexion avec différents mobiles.


Apple® iPad® (page 1) / Apple® iPhone® (page 2-3)

Android™ Tablette/Téléphone (page 4)

Windows® 10 Tablette (page 5-6)

### 1 Apple® iPad®: Connectez vous au WIFI


Premièrement, allumez le mannequin en appuyant sur le bouton démarrer sur le torse. Dès que la LED devient constante, la connexion wifi devient possible.

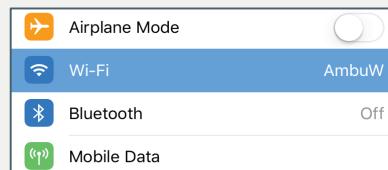

Allez dans **Paramètres → Wi-Fi**, Allumez le wifi et choisissez le réseau wireless « AmbuW ».

**Note:** La remarque « Aucune connexion internet » avec le symbole wifi n'est pas une erreur. Lors de la connexion avec le mannequin, l'internet n'est pas disponible.

### 1.1 Apple® iPad®: Eteindre les données mobiles

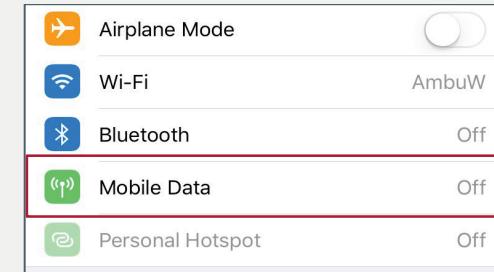


#### Mobile Data

#### Mobile Data Options

Ensuite, vous devriez éteindre vos données mobiles ( si vous avez une carte SIM ).


Veuillez aller dans **Paramètres → Données Mobiles** et éteignez vos données.

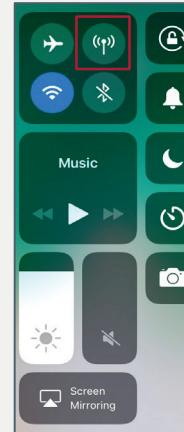


Autrement, vous pouvez l'éteindre dans le **Centre de contrôle** auquel vous pouvez accéder en double cliquant sur le bouton home ou en glissant vers le haut à partir du bas de l'écran.

**Note:** Ceci est nécessaire car le mobile ainsi que le navigateur vont continuer de chercher un accès à internet via les données mobiles. Cela veut dire que vous êtes connecté au Wifi mais sans avoir accès au mannequin.

## 1.2 Apple® iPad®: Accédez au « Mode d'affichage »

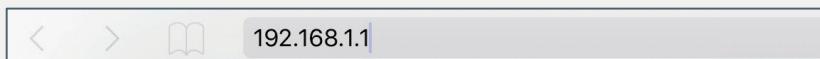

Ouvrez le navigateur et entrez <http://Ambu.login> ou **192.168.1.1** dans la barre d'adresse et appuyez sur entrer afin d'arriver sur le menu de démarrage du logiciel du mannequin Ambu.

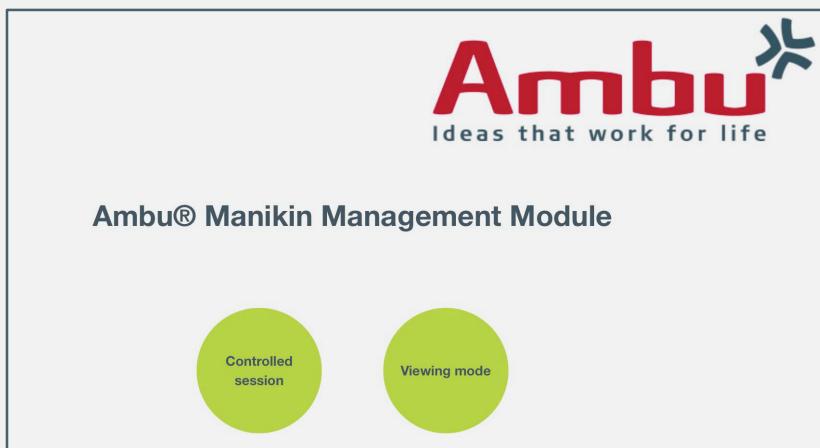


Après avoir accédé à la page, cliquez sur le bouton « mode d'affichage »

**Note:** Vous avez la possibilité d'accéder au mannequin depuis plusieurs outils simultanément et vous pouvez aussi ouvrir plusieurs pages d'un navigateur en parallèle. Si un instructeur est connecté dans la « Session contrôlée », personnes d'autres ne peut y accéder.

## 2 Apple® iPhone®: Connectez vous au WIFI


Premièrement, allumez le mannequin en appuyant sur le bouton démarrer sur le torse. Dès que la LED devient constante, la connexion wifi devient possible.

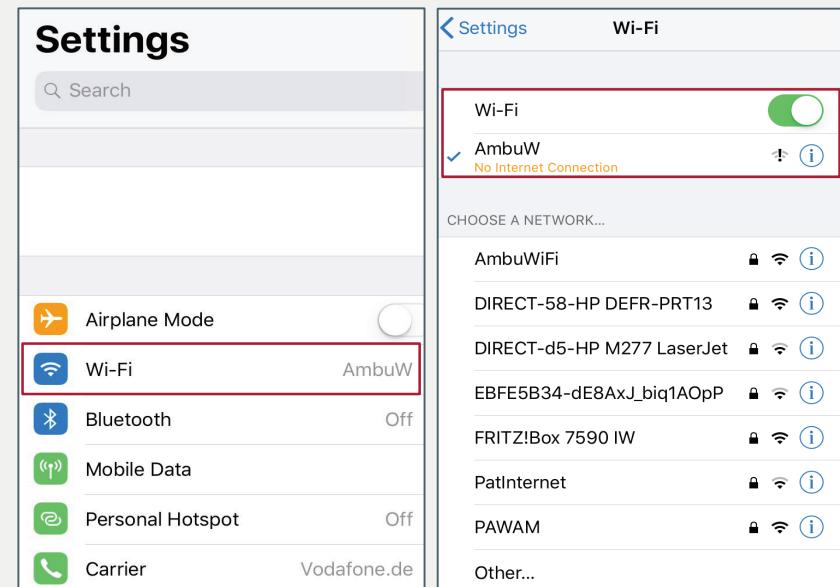

Veuillez aller dans **Paramètres → Wi-Fi**, Allumez le wifi et choisissez le réseau sans fil « AmbuW ».

**Note:** Le ! dans le symbole wifi n'est pas une erreur.  
Lorsque le mannequin est connecté au réseau Wifi, l'internet n'est pas disponible.

## 2.1 Apple® iPhone®: Eteignez les données mobiles

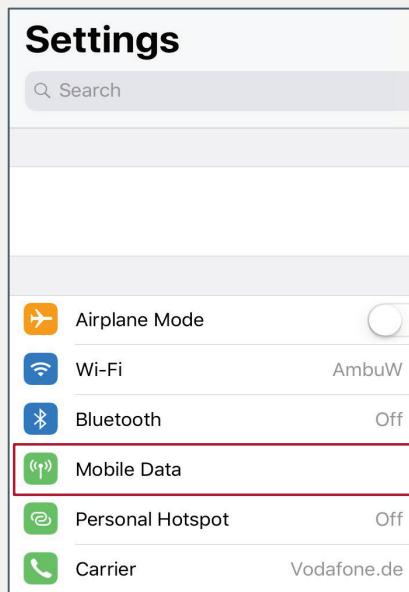


Ensuite, vous devriez éteindre vos données mobiles.  
Veuillez aller dans **Paramètres → Données Mobiles** et  
éteignez vos données.




Autrement, vous pouvez l'éteindre dans le **Centre de contrôle** auquel vous pouvez accéder en double cliquant sur le bouton home ou en glissant vers le haut à partir du bas de l'écran.

**Note:** Ceci est nécessaire car le mobile ainsi que le navigateur vont continuer de chercher un accès à internet via les données mobiles. Cela veut dire que vous êtes connecté au Wifi mais sans avoir accès au mannequin.

## 2.2 Apple® iPhone®: Accédez au « Mode d'affichage »

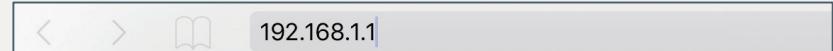

Ouvrez le navigateur et entrez <http://Ambu.login> ou **192.168.1.1** dans la barre d'adresse et appuyez sur entrer afin d'arriver sur le menu de démarrage du module de Management du mannequin Ambu. Si cette fenêtre apparait, appuyez sur "OK".

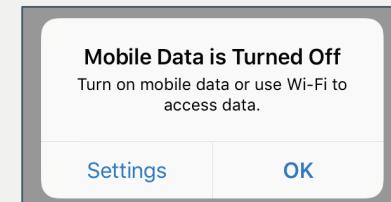


Après avoir accédé à la page, cliquez sur le bouton « Mode d'affichage »



**Note:** Vous avez la possibilité d'accéder au mannequin depuis plusieurs outils simultanément et vous pouvez aussi ouvrir plusieurs pages d'un navigateur en parallèle. Si un instructeur est connecté dans la « Session contrôlée », personnes d'autres ne peut y accéder.

### 3 Android™ Tablette/Téléphone: Connectez vous au WIFI


Premièrement, allumez le mannequin en appuyant sur le bouton démarrer sur le torse inférieur. Dès que la LED devient constante, la connexion wifi devient possible.

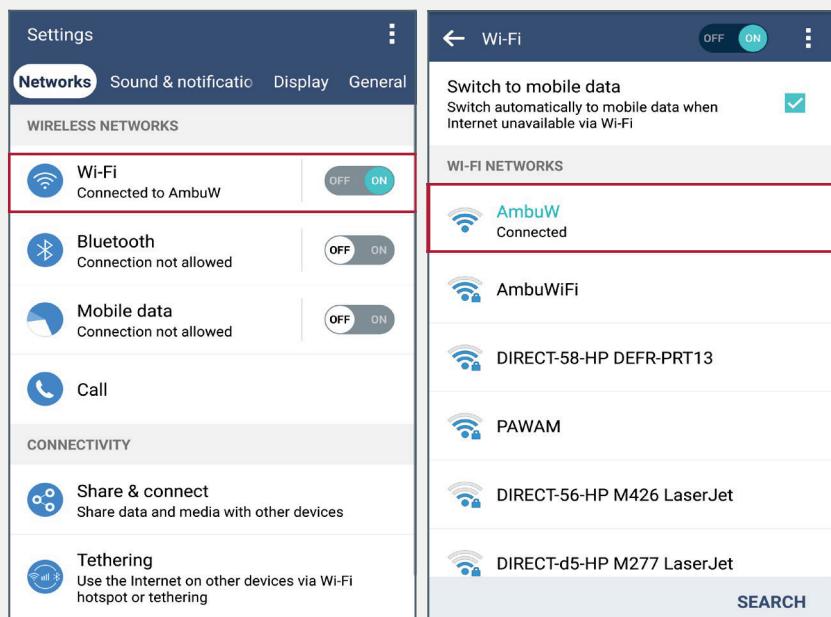

Veuillez aller dans **Paramètres → Internet → Wi-Fi**, allumez le et sélectionnez le réseau « AmbuW »

**Note:** Le ! dans le symbole wifi n'est pas une erreur.  
Lorsque le mannequin est connecté au réseau Wifi, l'internet n'est pas disponible.

### 3.1 Android™ Tablette/Téléphone: Eteignez les données mobiles

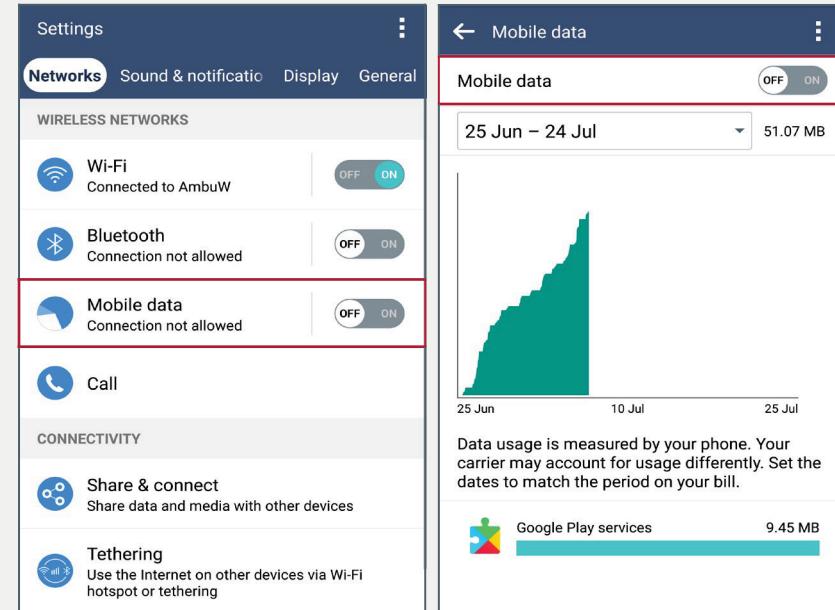


Vous pouvez aussi désactiver les notifications en glissant votre doigt depuis la barre située en haut de votre écran.

**Note :** cela est nécessaire car l'appareil et le navigateur continuent d'essayer d'accéder à Internet via la connexion des données mobile. Cela peut signifier que vous êtes connecté au WiFi mais que vous n'avez toujours pas accès au mannequin.

### 3.2 Android™ Tablette/Téléphone: Accédez au « Mode Affichage »



Ouvrez le navigateur et entrez <http://Ambu.login> ou **192.168.1.1** dans la barre d'adresse et appuyez sur entrer afin d'arriver sur le menu de démarrage du module de Management du mannequin Ambu.

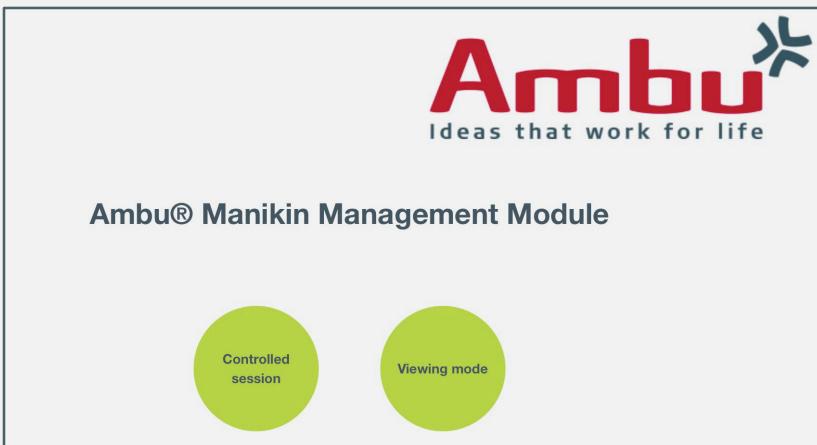


Après avoir accédé à la page, cliquez sur le bouton «mode d'affichage»

**Note:** Vous avez la possibilité d'accéder au mannequin depuis plusieurs outils simultanément et vous pouvez aussi ouvrir plusieurs pages d'un navigateur en parallèle. Si un instructeur est connecté dans la « Session contrôlée », personne d'autre ne peut y accéder.

### 4 Windows® 10 Tablette: Connectez vous au WIFI


Premièrement, allumez le mannequin en appuyant sur le bouton démarrer sur le torse. Dès que la LED devient constante, la connexion wifi devient possible.

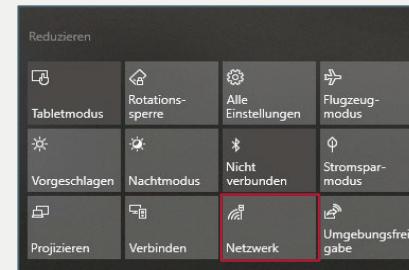

Veuillez accéder au Centre de commande en glissant du bord droit jusqu'au milieu, appuyez sur l'icône « Réseau ». Ensuite restez appuyé sur l'icône « Wifi » afin d'accéder aux options Wifi où vous connecter au réseau « AmbuW ».

**Note:** Si il n'y a pas d'icône Wifi, agrandissez le centre de commande.

Autrement, allez dans **Menu de démarrage → Options → Réseau & Internet → WiFi**, activez le et sélectionnez le réseau « AmbuW ».

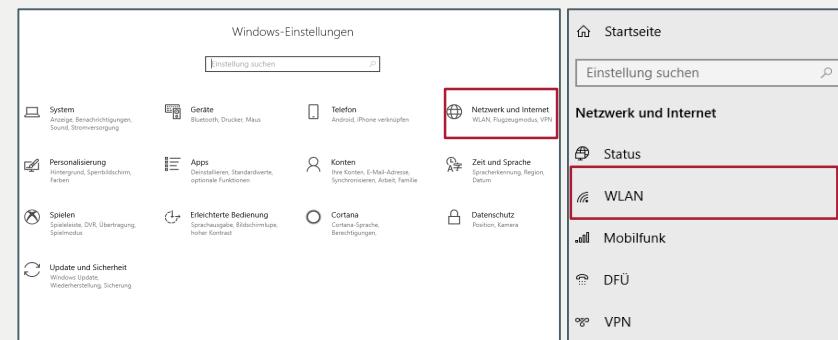


**Note:** Le ! dans le symbole wifi n'est pas une erreur.  
Lorsque le mannequin est connecté au réseau Wifi, l'internet n'est pas disponible.

## 4.1 Windows® 10 Tablette: Eteignez les données mobiles


La prochaine étape a pour but d'éteindre les données mobiles.  
(Si vous avez une carte SIM insérée).

Pour ce faire, allez dans le **Centre de commande** en glissant sur votre écran à partir du bord droit. Appuyez sur l'icône « **Réseau** ». Puis appuyez sur l'icône **“Cellulaire”** et désactivez le.


**Note:** Si il n'y a pas d'icône Réseau, agrandissez le centre de commande.

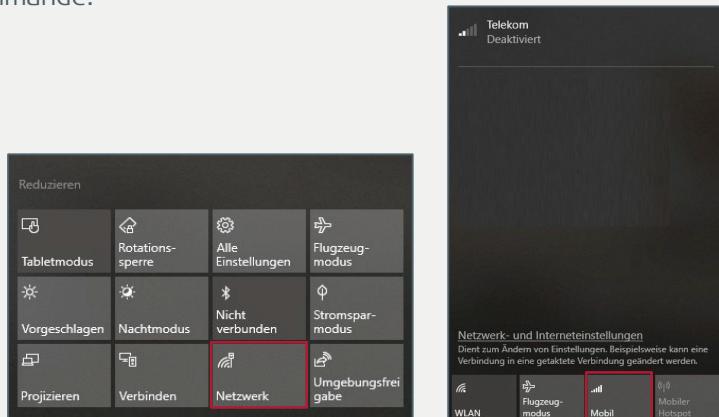


Autrement, allez dans **Menu de démarrage → Options → Réseau & Internet → Cellulaire** et désactivez les données mobiles.

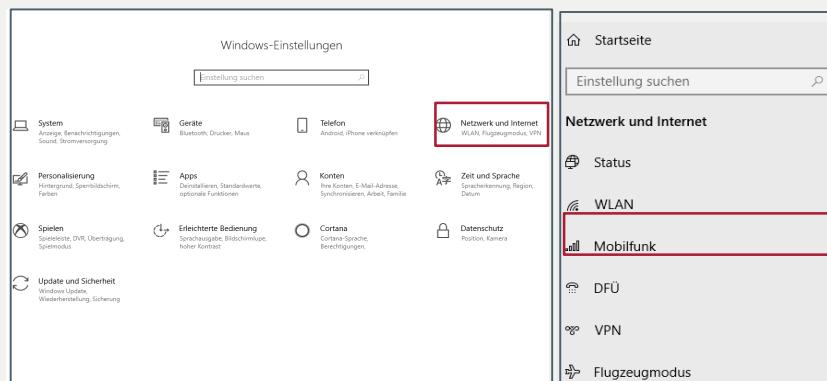

## 4.2 Windows® 10 Tablette: Accédez au « Mode d'affichage »

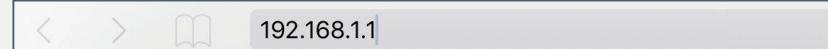

Ouvrez le navigateur et entrez <http://Ambu.login> ou **192.168.1.1** dans la barre d'adresse et appuyez sur entrer afin d'arriver sur le menu de démarrage du module de Management du mannequin Ambu.

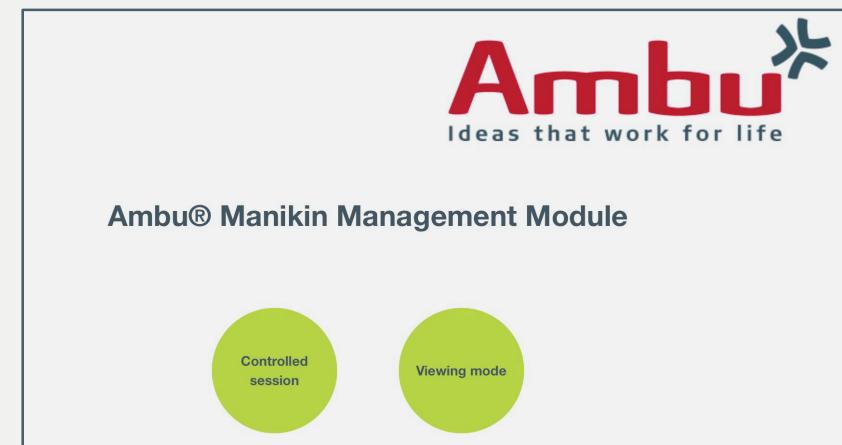

Après avoir accédé à la page, cliquer sur le bouton « Mode d'affichage »

**Note:** Vous avez la possibilité d'accéder au mannequin depuis plusieurs outils simultanément et vous pouvez aussi ouvrir plusieurs pages d'un navigateur en parallèle. Si un instructeur est connecté dans la « Session de contrôle », personne d'autre ne peut y accéder.