

# Guide rapide module de gestion Ambu®

## Gérer les sons

Dans les sections suivantes, vous découvrirez comment gérer les sons sur le mannequin.

Notez que les fichiers audio doivent répondre aux exigences suivantes:


- Le fichier doit être au format WAV (8 MHz, mono, 16Bit, libsndfile: waveform audio, a-Law 8-bit PCM (UIT-T G.711))
- Le fichier ne doit pas dépasser 3 Mo

### 1. Accédez à "Session contrôlée"

Démarrez le périphérique de formation et connectez votre périphérique final au périphérique de formation. Entrez **http://Ambu.login** ou **192.168.1.1** dans la barre d'adresse de votre navigateur et sélectionnez "Session contrôlée".




### 2. Gérer les sons

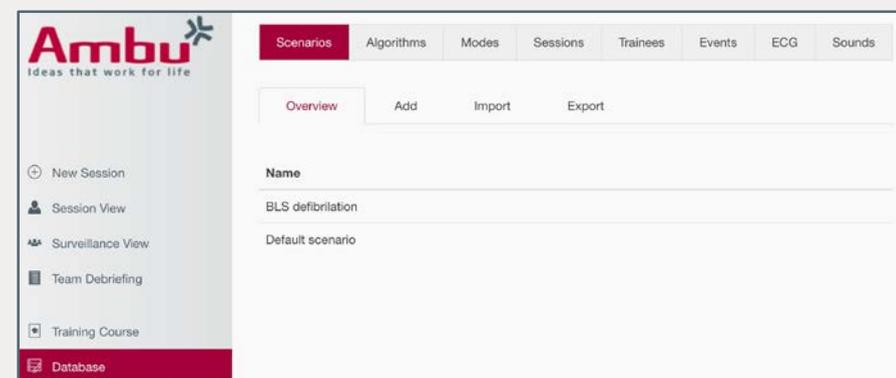


Dans la base de données, cliquez sur l'onglet "Sons".

Ici, vous trouverez un aperçu de tous les sons déjà enregistrés sur le mannequin. Si vous cliquez sur un des sons, vous pouvez le modifier ou le supprimer s'il n'est pas nécessaire.

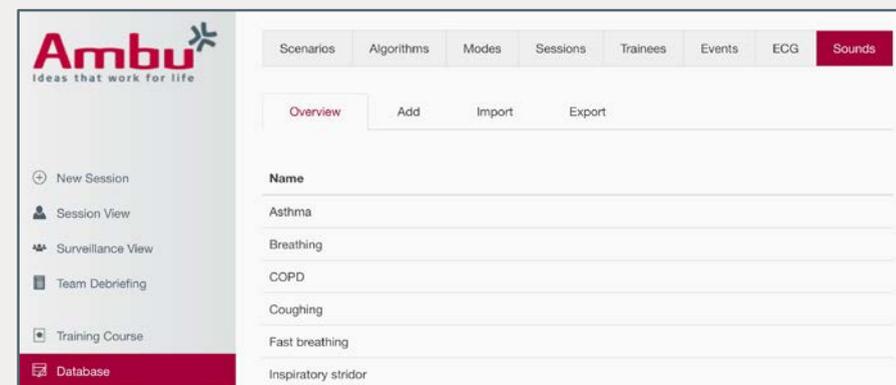


### 3. Télécharger un fichier audio


En outre, vous avez la possibilité de télécharger vos propres sons via l'onglet "Ajouter".

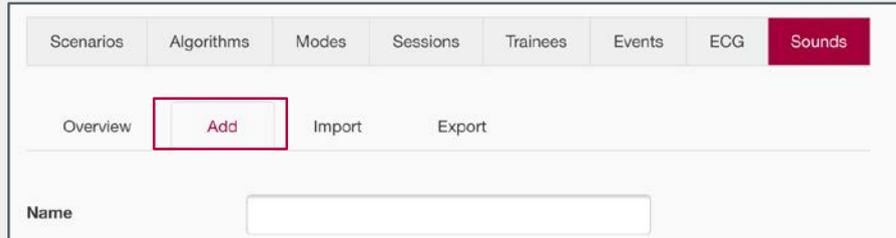

Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Télécharger" et sélectionnez le fichier audio. Indiquez le nom souhaité sous "Nom". De plus, vous pouvez spécifier le volume et ajouter une description. Enfin, cliquez sur le bouton "Enregistrer"  pour télécharger le nouveau son sur le mannequin.

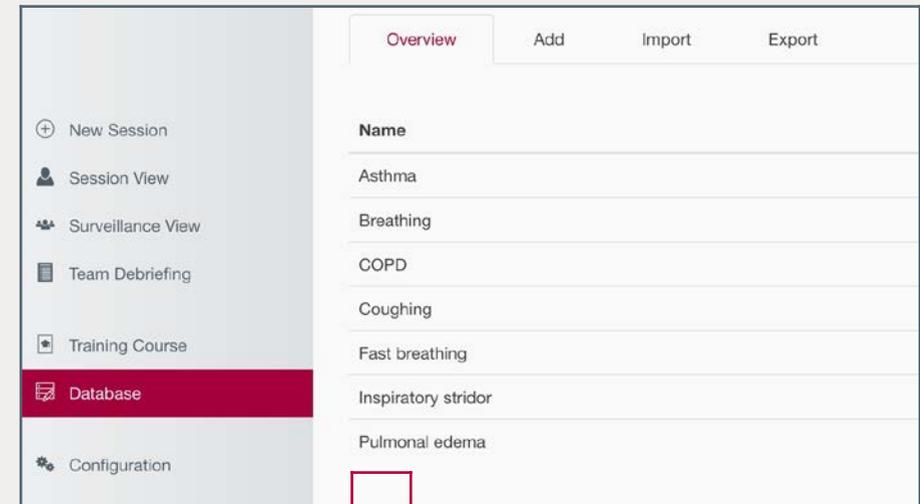

Le nouveau son est répertorié dans l'onglet "Présentation" une fois qu'il a été enregistré.

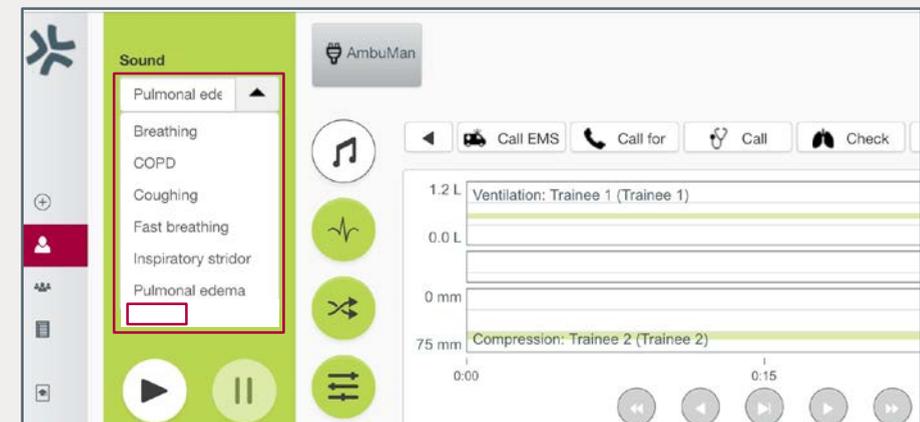

Si vous souhaitez lancer une nouvelle session, vous pouvez sélectionner le nouveau son dans la liste de sélection du menu sonore.