

AmbuMan[®] Airway Wireless

AmbuMan[®] Airway Instrument



Bras et jambes disponibles en option

Caractéristiques / Bénéfices

- Module de Management de Mannequin pour le contrôle, la documentation et le monitoring
- Compatibilité tout système d'exploitation
- Programmation de scénarios de formation
- Accès aux évaluations individuelles dans les formations de groupe
- Jusqu'à 6 mannequins en connexion simultanée
- Entraînement à la gestion des voies aériennes (masques laryngés, tubes laryngés, sondes endotrachéales)
- Robustesse technique
- Sac de transport : tapis de sol - sac à dos



AmbuMan[®] Airway

Avec l'AmbuMan Airway, toutes les méthodes courantes de la gestion des voies aériennes sont possibles. En revanche, ce mannequin n'est pas équipé du système hygiénique Ambu pour une ventilation bouche à bouche ou bouche à nez.

Il est possible de commander des jambes en option, de ce fait le mannequin peut être dans une position assise. Le sac de transport est solide et s'ouvre en tapis de sol pour plus de confort durant la formation.

Gestion des voies aériennes

Possibilités d'entraînement de gestion des voies aériennes avec des masques laryngés, tubes laryngés ou sondes endotrachéales. Ventilation par masque facial et utilisation de la canule de Guedel possible. Les voies respiratoires s'ouvrent seulement en cas de bascule prudente de la tête.

Moniteur de contrôle

AmbuMan Airway est doté d'un moniteur de contrôle indiquant l'efficacité de la réanimation, y compris les résultats obtenus pour le volume d'insufflation et la profondeur de compression externe de la cage thoracique. Le cas échéant, il affiche une insufflation stomacale ainsi qu'un mauvais positionnement des mains.

Module de Management du Mannequin Ambu

Le coeur de l'AmbuMan Airway Wireless est l'intégration de la nouvelle technologie Ambu Wireless, totalement dépourvue de fils ou câbles. Elle permet une connexion du mannequin à tout type de PC, tablette ou Smartphone et ce indépendamment du système d'exploitation ou du navigateur Internet.

Ce mannequin est aussi doté d'un moniteur de contrôle mécanique indiquant : l'efficacité de la réanimation, y compris les résultats obtenus pour le volume d'insufflation et la profondeur de compression externe de la cage thoracique. Le cas échéant, il affiche une insufflation stomacale ainsi qu'un mauvais positionnement des mains.

Module d'autoformation

AmbuMan Airway Wireless possède un module d'autoformation, libre de licence qui permet de s'entraîner seul en tout temps. Ainsi des équipes de réanimation peuvent s'entraîner continuellement de façon individuelle ou préparer un stagiaire à l'examen.

Spécificités

AmbuMan Airway Wireless	Connexion avec le mannequin	✓	WLAN, LAN ou NFC La technologie Ambu Wireless est basée sur la nouvelle génération du Module Intel WLAN
	Module de Management du Mannequin Ambu	✓	Conduite indépendante du système d'exploitation et basée sur le navigateur, résultats individuels jusqu'à 4 participants, le contrôle parallèle et la pratique jusqu'à 6 mannequins en connexion simultanée, compatible PC, tablette ou Smartphone.
	Alimentation électrique	✓	Batterie 10h d'autonomie garantie pendant 3 ans et câble d'alimentation inclus. Câble Ethernet non fourni.
Gestion des voies aériennes	✓		Entraînement à la gestion des voies aériennes : masques laryngés, tubes laryngés et sondes endotrachéales. Ventilation par masque facial et utilisation de la canule de Guedel possible. Les voies respiratoires s'ouvrent seulement en cas de bascule prudente de la tête.
Moniteur de contrôle manuel	✓		Volume de ventilation, profondeur de compression, position des mains, insufflation stomacale

Données techniques

Poids Torse et sac de transport	13 kg
Longueur torse	80 cm
Longueur corps complet	165

Références de commande

Références	Description
A 284 427 000	AmbuMan Airway Wireless Torse, collier cervical Ambu Perfit ACE (pour l'immobilisation du cou), intégration de la technologie Wireless, Module de Management du Mannequin Ambu, sac de transport
A 284 424 000	AmbuMan Airway Instrument Torse, collier cervical Ambu Perfit ACE (pour l'immobilisation du cou), sac de transport
Accessoires	
234 000 706	Lot de bras et jambes (compatible avec kit intra osseux) avec le pantalon et sac de transport
266 000 517	1 peau de visage Ambu
234 000 794	Sac de transport



AmbuMan Airway



Moniteur de contrôle

D'autres accessoires et pièces détachées disponibles sur demande.



Module de Management du Mannequin Ambu



Sac de transport avec sangles / tapis de sol intégré

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu sarl
Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33000 Bordeaux France
Tél. : (33) 05 57 92 31 50
Fax : (33) 05 57 92 31 59
www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr